



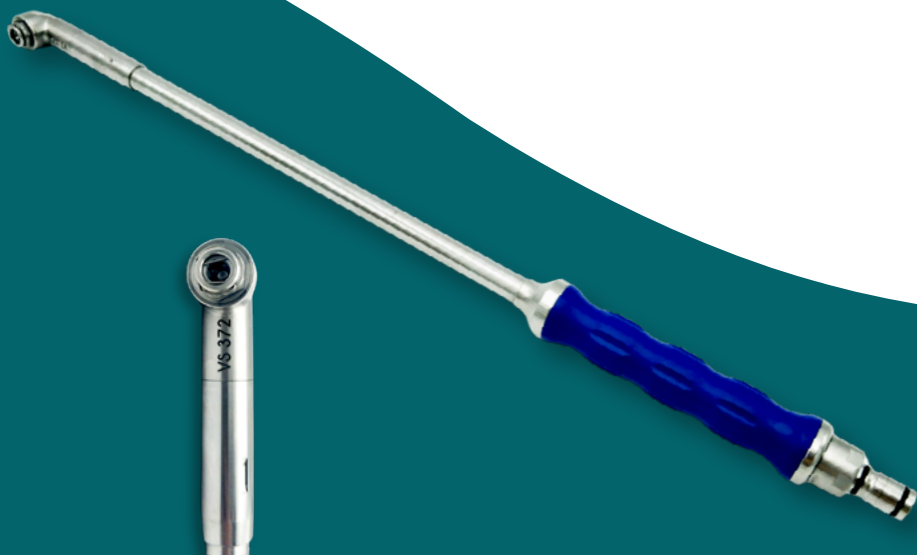

NOTICE D'UTILISATION

Vet switch clic

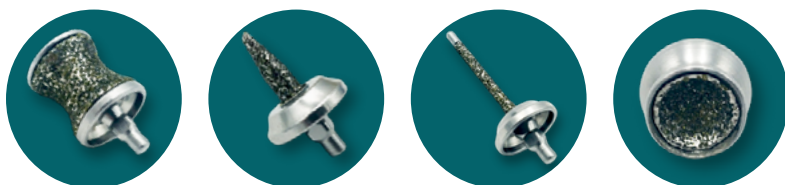


Procédure de changement des inserts

MÉTHODE 1

Cette méthode est la plus simple, commencez par retirer votre flexible.




Après avoir retiré votre flexible, placez la cale au niveau de la connectique.

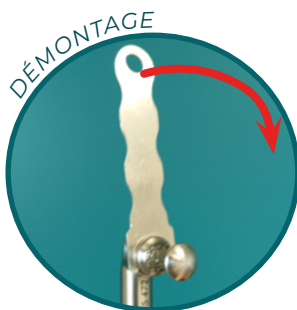

Placez la clé autour de l'écrou puis tournez la clé d'un quart de tour pour décliper l'insert. Retirez la clé.



Pour cliper le nouvel insert, poussez-le et tournez-le en même temps. Lorsqu'il s'enfonce, vous devez entendre un clic.

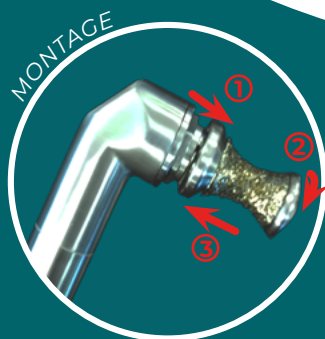

Vous n'entendez pas de clic ? Retirez l'insert (1), faites-lui faire un quart de tour (2) et insérez l'insert à nouveau (3).



Tirez sur l'insert afin de vérifier qu'il est bien en place. Vous n'avez plus qu'à allumer le moteur et commencer à travailler !

Procédure de changement des inserts

MÉTHODE 2


Pour cette méthode, pas besoin de retirer le flexible, éteignez simplement le moteur.



Placez la clé autour de l'écrou et tournez l'insert d'un quart de tour pour le décliper.



Insérez le nouvel insert, vous devez entendre un clic.

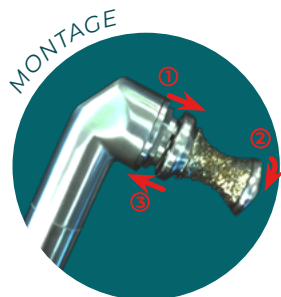

Si ce n'est pas le cas, retirez l'insert (1), faites-le faire un quart de tour (2) et insérez l'insert à nouveau (3).



Tirez sur l'insert afin de vérifier qu'il est bien en place.
Vous n'avez plus qu'à allumer le moteur et commencer à travailler !

Attention !

Si vous n'entendez pas le «clic», c'est que l'insert est mal connecté.

Recommandations d'entretien

1 Recommandations générales

S'assurer que l'insert diamanté soit bien connecté avant de commencer à travailler.

Toujours stocker avec un insert diamanté en place.

Avant de ranger votre équipement, assurez-vous qu'il soit toujours propre et sec.

Vet-Design vous recommande une maintenance préventive tous les 6 mois pour les fraises et les flexibles.

Il est important de ne pas laisser d'eau dans les connectiques, cela pourrait endommager le matériel.

2 Entretien des fraises diamantées

Évitez de laisser vos fraises immergées dans l'eau.

Pour le nettoyage de la fraise, Vet-Design recommande de mettre en marche le moteur.

- Brossez l'insert diamanté en fonctionnement à l'aide d'une brosse inox pour éliminer les dépôts de dentine.
- Rincez et/ou désinfectez, puis assurez-vous de bien évacuer le liquide en faisant tourner la fraise hors de l'eau.
- Éteignez le moteur puis bien séchez à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.

Adresse

Vet-Design
7 Ter Rue du Clos Michel
35 590 Saint-Gilles
FRANCE

Contact

+33(0)2.21.81.11.71
contact@vet-design.com



V.2025/11/12