




NOTICE D'UTILISATION


Easy

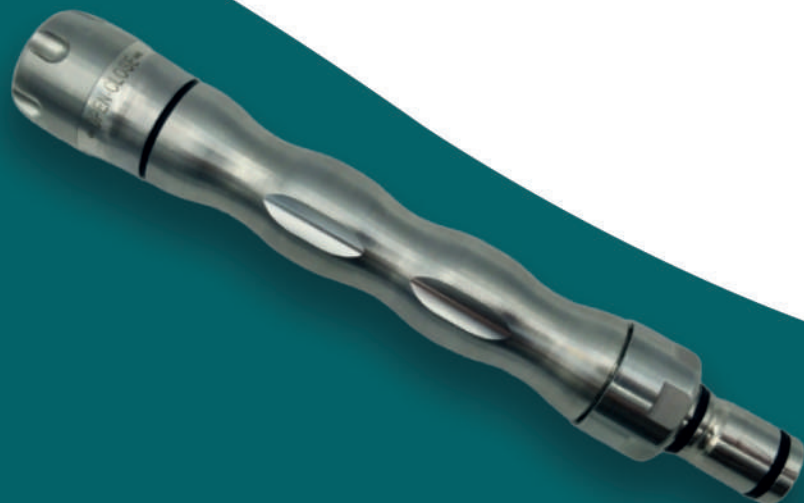

Branchement insert diamanté

Attention !

Le sens de vissage est inversé au sens classique, suivez le tracage sur le manche pour vous repérer.

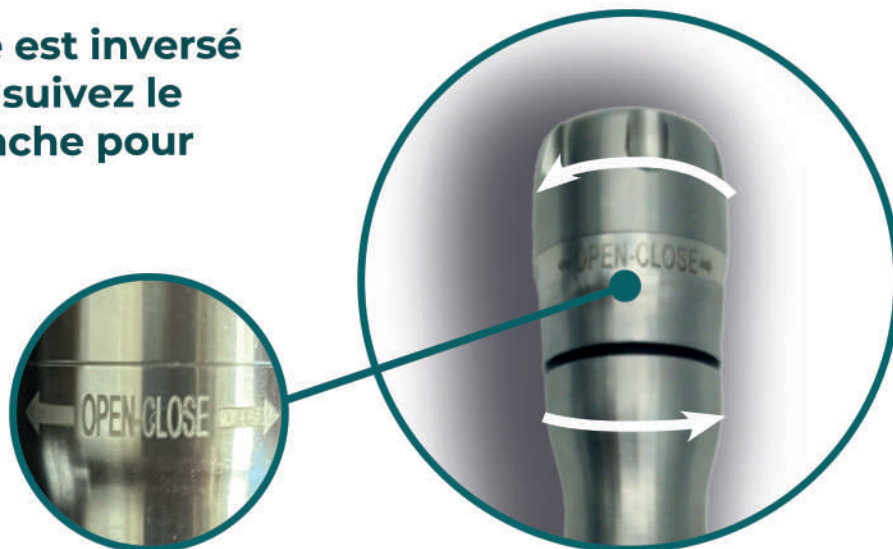

Procédure de changement des inserts diamantés



Dévissez la tête et retirez l'insert diamanté



Insérez le nouvel insert diamanté en faisant attention au carré



Revissez bien et votre fraise easy est prête à utiliser

Recommandations d'entretien

1 Recommandations générales

S'assurer que l'insert diamanté soit bien connectée avant de travailler.

Avant de ranger votre équipement, assurez-vous qu'il soit toujours propre et sec.

Il est important de ne pas laisser d'eau dans les connectiques, cela pourrait endommager le matériel.

Toujours stocker avec un insert diamanté en place.

Vet-Design vous recommande une *maintenance préventive* tous les ans.

2 Entretien des inserts diamantés

Évitez de laisser vos fraises immergées dans l'eau.

Pour le nettoyage de la fraise, Vet-Design recommande de mettre en marche le moteur.

- Brossez la tête diamantée en fonctionnement à l'aide d'une brosse inox pour éliminer les dépôts de dentine.
- Rincez et/ou désinfectez, puis assurez-vous de bien évacuer le liquide en faisant tourner la fraise hors de l'eau.
- Bien sécher à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.

Adresse

Vet-Design
7 Ter Rue du Clos Michel
35 590 Saint-Gilles
FRANCE

Contact

+33(0)2.21.81.11.71
contact@vet-design.com

