



NOTICE D'UTILISATION LAMPE OUVRE-BOUCHE



Connexion de la lampe

La lampe se compose d'une batterie et d'une partie LED étanche. Insérer le connecteur des LED dans l'axe du témoin blanc.

Attention ! NE PAS TOURNER

- **pousser pour connecter**
- **tirer pour déconnecter**



Pour installer la lampe sur l'ouvre-bouche, glissez le boîtier sur la branche droite puis adapter les clips e, appuyant dessus. L'aimant aide à maintenir.



Pour allumer la lampe et sélectionner l'intensité lumineuse, il suffit d'appuyer 1, 2 ou 3 fois sur le bouton poussoir :

- 1 fois : intensité 50% (autonomie de 14h)
- 2 fois : intensité 75% (autonomie de 10h30)
- 3 fois : intensité de 100% (autonomie de 7h)

Après 30 secondes d'utilisation à l'intensité souhaitée, vous pouvez éteindre les LED en appuyant une fois sur le bouton.

Batterie

1 Vérifier le niveau de charge

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Si le bouton clignote :

- 4 fois, cela signifie que la batterie est chargée à 75 - 100%
- 3 fois, cela signifie que la batterie est chargée à 50 - 75%
- 2 fois, cela signifie que la batterie est chargée à 25 - 50%


Quand le niveau de batterie sera inférieur à 30%, les LED clignoteront rapidement toutes les 10 minutes pour vous prévenir.

2 Charger votre lampe

La lampe s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'utilisation pour s'économiser en cas d'activation dans votre malette de transport par exemple.

La charge s'effectue via le port USB-C. Un câble de charge est fourni à cet effet dans la malette. Certains câbles USB-C ne sont pas compatibles et ne fonctionnent pas pour cette batterie.

Pendant la charge, le bouton clignotera puis restera bleu lorsque la batterie est pleine.

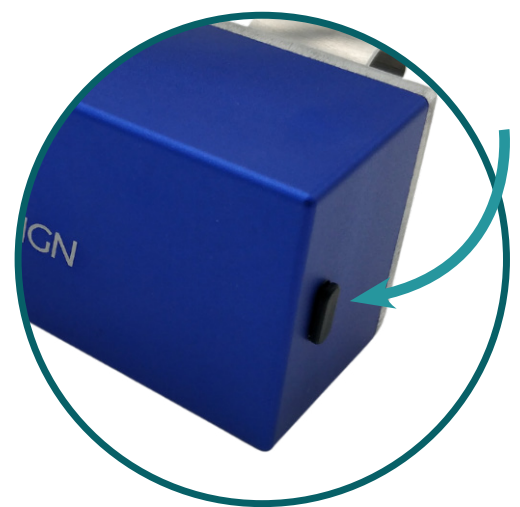

Adresse

Vet-Design
7 Ter Rue du Clos Michel
35 590 Saint-Gilles
FRANCE

Contact

+33(0)2.21.81.11.71
contact@vet-design.com

